

Urządzenie AABR/OAE do przesiewowych badań słuchu noworodków



medicus expert

aparatura
medyczna

Badanie AABR

Nigdy nie było prostsze

GSI Novus

Obiektywny i dokładny

GSI Novus™ skonfigurować można z dowolną kombinacją AABR, TEOAE i DPOAE, co pozwala na płynne dwuetapowe badanie przesiewowe niemowląt. Posiada ekran dotykowy i intuicyjne oprogramowanie w kompaktowej obudowie.



Testuj oba uszy w tym samym czasie

Novus pozwala na testowanie obu uszu jednocześnie przy użyciu wkładek wewnętrznych lub za pomocą nakładek nausznych tzw. ear cups. Jednoczesne badanie obu uszu zapewnia znaczną oszczędność czasu.



Zarządzaj Swoimi danymi z HEARSIM

Oprogramowanie do zarządzania danymi HearSIM™ oferuje wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania programem badań przesiewowych słuchu noworodków. Załaduj nazwiska Pacjentów do urządzenia Novus lub szybko określ, którzy Pacjenci wymagają dodatkowych badań, korzystając z intuicyjnego widoku bazy danych. Oprócz przeglądania, przechowywania i drukowania wyników, możliwe jest eksportowanie danych do Hi-Track lub zapisywanie w innych formatach, takich jak XML. Ustawienia urządzenia, takie jak nazwy osób monitorujących, bezpieczeństwo i czynniki ryzyka, można skonfigurować z poziomu karty HearSIM.

Wszystko w jednym urządzeniu

➤ **Testy AABR/OAE**

Novus może łączyć możliwości AABR i OAE w jednym urządzeniu. Skróć czas szkolenia i monitoruj niemowlęta na oddziałach porodowych i intensywnej terapii.

➤ **CE-CHIRP**

Zakres odpowiedzi na bodziec CE-Chirp w ABR są dwukrotnie większe niż w przypadku tradycyjnego bodźca typu trzask. Mocniejsze odpowiedzi skutkują krótszym czasem testu.

➤ **PASS/REFER**

Oszczędzaj czas dzięki automatycznym wynikom natychmiast po spełnieniu kryteriów zaliczenia/rekomendacji. Novus posiada zoptymalizowany algorytm dla niemowląt.

➤ **Wyświetlacz**

Personel przeprowadzający badanie przesiewowe pracuje komfortowo dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu i może płynnie poruszać się po kolejnych krokach badania.

➤ **Ładowanie**

Do zestawu Novus dołączona jest bezprzewodowa stacja ładująca. Testy przesiewowe można przeprowadzić w dowolnym momencie, nawet gdy poziom naładowania baterii jest niski

➤ **Przenośny**

Kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwy transport Novusa przy łóżku niemowlęcia. Novus to idealne rozwiązanie dla każdego oddziału szpitalnego, który potrzebuje urządzenia przesiewowego, komfortowego w użyciu i szybko działającego.

➤ **Niezawodny**

Novus został zaprojektowany tak, aby wytrzymywał ciągłe, intensywne badania przesiewowe w szpitalach i jest urządzeniem, na którym można polegać każdego dnia.

➤ **Łatwy**

Novus posiada prosty i logiczny interfejs, którego każdy z personelu może nauczyć się szybko i pewnie.

➤ **Opcja szybkiego testu**

Wykonaj test bez podawania danych demograficznych. Jest to idealne rozwiązanie podczas szkolenia nowego personelu.

medicus expert
aparatura
medyczna

Pl. Strzelecki 24
50-224 Wrocław

tel.: +48 71 34 72 100
faks: +48 71 34 72 111

e-mail: info@medicusexpert.pl
www.medicus.com.pl/expert